

TERAPİ VE REHABİLİTASYON LABORATUARI CİHAZ KULLANIM TALİMATLARI

1-AMAÇ: Bu talimatın amacı, laboratuvarımızdaki kullanılan cihazlar ile ilgili hususları tanımlamaktır.

2-KAPSAM: Terapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarındaki bulunan tıbbi cihazları kapsar.

3- SORUMLULAR: Terapi ve Rehabilitasyon Laboratuvar Sorumlusu Öğr.Gör. Şeyma Şentürk

4- TALİMATLAR

1.İNFRARUJ CİHAZI KULLANIMI:

- Cihazın fişi prize takılır.
- Cihazın ısınması için tedaviden 5 dakika önce çalıştırılır.
- Hasta tedavi için hazırlanır, pozisyonlanır.
- Cihaz tedavi bölgesine uygun uzaklıkta yerleştirilir.
- Cihaz açma kapama düğmesinden açılır.
- Tedavi sırasında aşırı kızarıklık, baş dönmesi, mide bulantısı gibi belirtiler olursa takip edilir, tedavi sonlandırılır.
- Tedavi süresi bitiminde cihaz kapatılır.
- Cihazın fişi prizden çıkarılır.
- Ampüllerde patlama, bozulma olursa yetkiliye bildirilir.

2. PARAFİN KAZANI KULLANIMI:

- Cihaz fişinin takılı olduğu kontrol edilir.
- Parafin eriyiğinin ısısı kontrol edilir.
- Hastanın uygulamadan önce ellerini yıkaması istenir.
- Tedavi edilecek bölgeyi 5 saniye aralıklar la 5-10 kez eriğin içine daldırması söylenir.
- Tedavi sırasında aşırı kızarıklık, baş dönmesi, mide bulantısı gibi belirtiler olursa takip edilir, tedavi sonlandırılır.
- 20 dk bekletilir.
- Süre dolduktan sonra donan parafin çıkarılıp içine atılır.
- Açık yarası olan hastalarca kullanılmaz.

3. STİMÜLASYON CİHAZI KULLANIMI:

- Hasta tedavi için hazırlanır.
- Cihazın açık olup olmadığı kontrol edilir.
- Kanalların takılı olup olmadığı kontrol edilir.
- Hasta uygun şekilde pozisyonlanır.

- Cihazın elektrotları tedavi bölgesine uygun bir şekilde yerleştirilir.
- Cihazın açma kapama düğmesi açılır, hastaya özel akım ayarlanır.
- Tedavi uygulanır.
- Tedavi süresi bitiminde akım kesilir ve cihaz kapatılır.
- Cihaz bir sonraki kullanım için hazır hale getirilir.

4. WHIRLPOOL CİHAZI KULLANIMI:

- Fiş prize takılır.
- Suyun ısısı 40-50 derece civarında ayarlanır.
- Hastada açık yara, enfeksiyon varlığı sorgulanmalıdır.
- Hastanın uzvu suyun içine daldırılır.
- Açma kapama düğmesinden makine çalıştırılır.
- Hasta tribüne değmemesi, pozisyonunu koruması için uyarılır.
- Tedavi 20dk sürdürülür.
- Hasta uzvunu çıkarır kurular.
- Her işlem sonrası bulaşı riskine karşı kazan dezenfekte edilmelidir.

5.HOT-PACK KAZANI KULLANIMI:

- Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kazanın sıcaklık derecesini kontrol ediniz. (70-80 derece)
- Kazandan uygulayacağımız materyali alarak havluya sararak tedavi edilecek bölgeye uygulayınız.
- Tedavi sırasında aşırı kızarıklık, baş dönmesi, mide bulantısı gibi belirtiler olursa takip edilir, tedavi sonlandırılır.
- İşlem bittikten sonra materyali kazana tekrara koyunuz.
- Havluyu kirli sepetine atınız.
- Kazanın suyunu haftada bir değiştiriniz. Su eksildiğinde ilave ediniz.
- Cihazdaki herhangi bir anormallikte teknik servise haber veriniz.