



T.C.
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
PARAFİN KAZANI KULLANIM TALİMATI

Doküman No:1053

İlk Yayın Tarihi: 28.03.2025

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Kurum Amiri: Müdür

PARAFİN KAZANI KULLANIMI:

- Cihaz fişinin takılı olduğu kontrol edilir.
- Parafin eriyiğinin ısısı kontrol edilir.
- Hastanın uygulamadan önce ellerini yıkaması istenir.
- Tedavi edilecek bölgeyi 5 saniye aralıklar la 5-10 kez eriğın içine daldırması söylenir.
 - 20 dk bekletilir.
- Süre dolduktan sonra donan parafin çıkarılıp içine atılır.
 - Açık yarası olan hastalarca kullanılmaz