



T.C.
AYDIN ADNAN MENDERES
ÜNİVERSİTESİ
Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
WHIRLPOOL CİHAZI KULLANIM
TALİMATI

Doküman No: NS-1054

İlk Yayın Tarihi: 28.03.2025

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Kurum Amiri: Müdür

WHIRLPOOL CİHAZI KULLANIMI:

- Fiş prize takılır.
- Suyun ısı 40-50 derece civarında ayarlanır.
 - Hastanın uzvu suyun içine daldırılır.
- Açma kapama düğmesinden makine çalıştırılır.
 - Tedavi 20 dk sürdürülür.
 - Hasta uzvunu çıkarır kurular.