

	T.C. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Doküman No: NS 1073	
		İlk Yayın Tarihi:	17.06.2025
		Revizyon Tarihi:	
		Revizyon No:	

NAMROL PODOLOJİ ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU

1. GİRİŞ

NAMROL Podoloji Ünitesi, ayak sağlığı uygulamaları için özel olarak tasarlanmış ergonomik bir tedavi ünitesidir. Bu kılavuz, cihazın doğru, güvenli ve hijyenik kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. CİHAZ BİLEŞENLERİ

- **Elektrikli Ayak ve Sırt Ünitesi:** Hastanın pozisyonunu ayarlamak için kullanılır.
- **Frez Motoru:** Tırnak ve nasır işlemlerinde kullanılır.
- **Aspirasyon Sistemi:** Frez esnasında oluşan partikülleri emer.
- **Lamba Ünitesi:** İşlem alanını aydınlatır.
- **Alet Tepsisi ve Entegre Kontroller:** Cihaz fonksiyonlarını yönetmeye yarar.

3. KULLANIM TALİMATLARI

Cihazı Açma:

1. Ünitenin güç kablosunun prize takılı olduğundan emin olun.
2. Ana güç düğmesini (genellikle cihazın yan veya arka kısmında yer alır) açın.
3. Kumanda panelinden hastaya uygun pozisyonu ayarlayın.

Frez Kullanımı:

1. Uygun frez ucunu seçin ve frez başlığına takın.
2. Hızı düşük seviyede başlatın, sonra ihtiyaca göre ayarlayın.
3. Uygulama sırasında aspirasyon sistemi otomatik devreye girer.

Hasta Pozisyonu:

- Sırt ve ayak bölümleri kumanda ile ayarlanabilir.
- İşlem süresince hastanın konforu ve güvenliği gözetilmelidir.

4. TEMİZLİK VE BAKIM

- Her uygulama sonrası frez başlığı çıkarılmalı ve steril edilmelidir.
- Aspirasyon filtresi düzenli olarak kontrol edilmeli ve değiştirilmelidir.
- Tüm yüzeyler ve tepsi dezenfektan ile silinmelidir.
- Ünitenin dışı nemli bezle temizlenmeli, aşındırıcı kimyasallardan kaçınılmalıdır.

5. GÜVENLİK UYARILARI

- Cihaz ıslak elle kullanılmamalıdır.
- Elektrik aksamına sıvı temas ettirilmemelidir.
- Cihaz çalışırken frez ucu değiştirilmemelidir.
- Arıza durumunda öğretim elemanına bilgi verilmelidir.

6. DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Ünitenin her kullanımdan önce ve sonra kontrolü yapılmalıdır.
- Frez uçları kişisel kullanım içindir, başkalarıyla paylaşılmamalıdır.
- Kullanım sonrası cihaz kapatılmalı ve tezgah düzenli bırakılmalıdır.

Uygulamalarda hem hasta güvenliği hem cihazın ömrü açısından bu kurallara uyulması zorunludur. Eğitim dışı kullanım kesinlikle yasaktır.