



T.C.
AYDIN ADNAN MENDERES
ÜNİVERSİTESİ
Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu

STİMÜLASYON CİHAZI KULLANIM
TALİMATI

Doküman No: NS-1067

İlk Yayın Tarihi: 28.03.2025

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Kurum Amiri: Müdür

- Hasta tedavi için hazırlanır.
- Cihazın açık olup olmadığı kontrol edilir.
- Kanalların takılı olup olmadığı kontrol edilir.
- Hasta uygun şekilde pozisyonlanır.
- Cihazın elektrotları tedavi bölgesine uygun bir şekilde yerleştirilir.
- Cihazın açma kapama düğmesi açılır, hastaya özel akım ayarlanır.
- Tedavi uygulanır.
- Tedavi süresi bitiminde akım kesilir ve cihaz kapatılır.
- Cihaz bir sonraki kullanım için hazır hale getirilir.