

	T.C. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Doküman No: NS 1068	
		İlk Yayın Tarihi:	17.06.2025
		Revizyon Tarihi:	
		Revizyon No:	

ASPIRATÖR CİHAZI

Aspiratör cihazı, vücut sıvılarını, sekresyonları (balgam, kan, kusmuk vb.) veya diğer sıvıları vakumla çekerek uzaklaştırmak için kullanılan bir tıbbi cihazdır. Bu cihazlar, özellikle cerrahi müdahalelerde, yoğun bakım ünitelerinde, acil servislerde ve hasta bakımında yaygın olarak kullanılır. Aspiratörler, hastanın solunum yolunun açık kalmasını sağlamak veya cerrahi alanın temizlenmesi gibi durumlarda hayati öneme sahiptir.

Aspiratör Cihazı Kullanım Kılavuzu

1. Hazırlık:

- Cihazın temiz ve steril olduğundan emin olun.
- Tek kullanımlık aspiratör kateterini ve tüpünü hazırlayın.
- Cihazın vakum gücünü uygun seviyeye ayarlayın (düşük basınç hassas dokular için, yüksek basınç yoğun sekresyonlar için).

2. Kullanım:

- Aspiratör kateterini hastanın solunum yoluna veya hedeflenen bölgeye nazıkçe yerleştirin.
- Cihazı çalıştırın ve sıvıları çekmeye başlayın.
- Kateteri döndürerek veya ileri-geri hareket ettirerek sekresyonları temizleyin.
- İşlem sırasında hastanın vital bulgularını (nabız, oksijen satürasyonu vb.) takip edin.

3. Temizlik ve Bakım:

- Kullanılan kateter ve tüpleri atın.
- Cihazın filtrelerini düzenli olarak değiştirin.
- Cihazın dış yüzeyini dezenfekte edin.
- Taşınabilir aspiratörlerin pillerini şarj edin veya değiştirin.

4. Güvenlik Önlemleri:

- Aspirasyon işlemi sırasında hastanın oksijen seviyesini izleyin.
- Uzun süreli aspirasyondan kaçının, çünkü bu doku hasarına neden olabilir.
- Cihazın vakum gücünü aşırı yüksek ayarlamayın.