


	T.C. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		Doküman No: NS 1071
			İlk Yayın Tarihi: 17.06.2025
			Revizyon Tarihi:
			Revizyon No:

ELEKTROKARDİYOĞRAFI (EKG) CİHAZI KULLANMA TALİMATI

*Cihazın güç kablosu topraklı prize takılır.

*Elektrotlar aşağıdaki şekilde bağlanır.

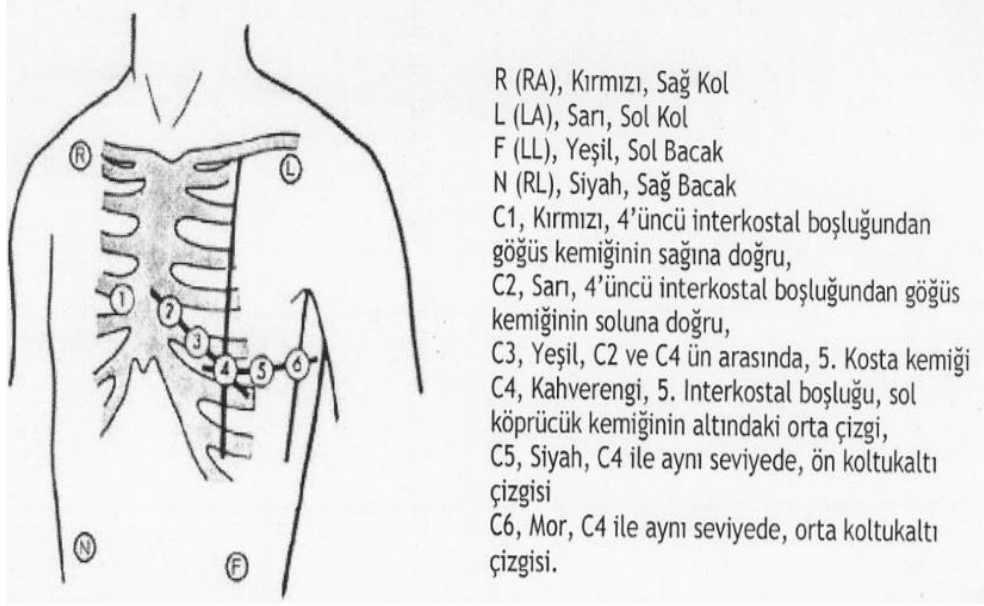

*Cihazın açma/kapama anahtarı açılır.

*Uygun mod seçilir, start düğmesine basılarak çekim yapılır.

*İşlem bittiğinde elektrotlar hastadan sökülür.

*EKG kabloları dairesel olarak toplanır.

* Cihazı açma/kapama anahtarından kapatılır.

* EKG cihazı kullanıma hazır durumda bırakılır.

*Günlük olarak, sarj olup olmadığı açıp kapatılarak batarya göstergesinden kontrol edilir.

	T.C. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Doküman No: NS 1072	
		İlk Yayın Tarihi:	17.06.2025
		Revizyon Tarihi:	
		Revizyon No:	

MONİTÖR CİHAZI KULLANMA TALİMATI

*Hastabaşı Monitör; Hasta bağlantı aparatları monitörde bulunan yerlere takılır.

*Hastaya EKG kabloları, tansiyon aleti manşonu ve pulse oksimetre probu takılır.

*Hasta başı Monitörünün güç kablosu topraklı prize takılır.

*Hasta başı Monitörünün açma/kapama tuşu ile açılır.

*Belirtilen tüm parametreler monitörden izlenir.

*Hasta başı Monitörü ve bütün aparatları kullanıma hazır halde bırakılır.